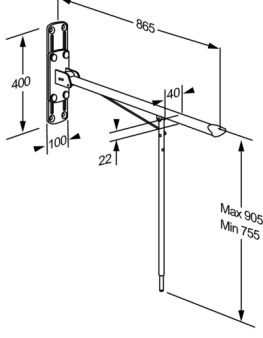




<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	VALUE toalettarmstöd, höjdreglerbart R1111000
<b>Färg</b>	VVS:615722410 NRF:6191644 RSK:7972413 EAN:5708590176437 HMI: 25414 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Vit
<b>Beskrivning</b>	 <p>Toalettarmstöd med ben, höjd justerbar 150 mm. Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat.</p> <p>Toalettarmstöd med ben, höjd justerbar 150 mm. Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat.</p>
<b>Justerbar</b>	Höjdreglerbar
<b>Höjdjustering</b>	145 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Max belastning: 135 kg. När toalettarmstödet belastas med 135 kg, belastas varje fästskruv med 29 kg.
<b>Material</b>	Toalettarmstöden är tillverkad av rostfritt stål med en Rilsan-belagd yta som är skön att röra vid, lätt att rengöra och skyddar mot rost. Ändpluggarna är gjorda av nylon (PA).
<b>Ergonomi</b>	Den ergonomiska designen ger ett fast och skönt grepp och det är lätt att känna var stöden slutar. Bred stödyta för hand och arm. En bra hjälp när du sitter, står eller flyttning till och från toaletten.
<b>Funktioner</b>	Stöden kan fällas upp när den inte används.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

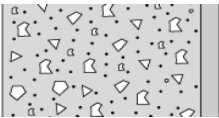
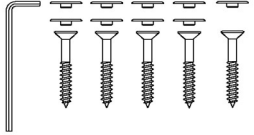

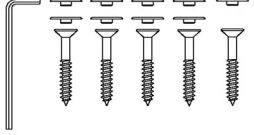
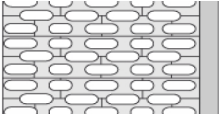
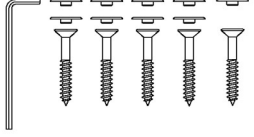
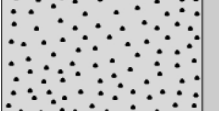
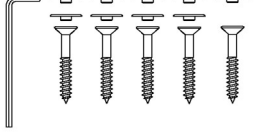
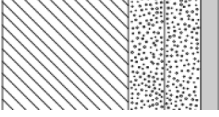
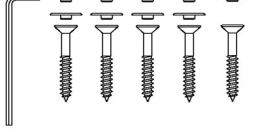
<b>Product</b>	VALUE toalettarmstöd, höjdregerbart
<b>Varunummer</b>	R1111000
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Tvättsprit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningsen kan uppstå.</p>
<b>Överensstämmelses deklaration</b>	Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.





<b>Product</b>	VALUE toalettarmstöd, höjdglerbart
<b>Varunummer</b>	R1111000

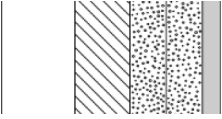
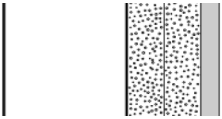
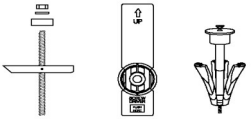
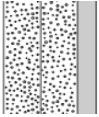

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= H12</b> V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8592 - 5 st. skruvar Ø10 x 80 försänkt, med vita täckknappar er inkluderat. Pluggs måste beställas separat.	





# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	VALUE toalettarmstöd, höjreglerbart R1111000
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringskruv (5 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (5 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®